

Dezinfecția instrumentelor

DESCOTON 2 % GDA

Dezinfectant pentru instrumentar

- acțiune rapidă
- gata de utilizare
- compatibil cu orice tip de material



Descriere produs

DESCOTON 2 % GDA este un produs gata de utilizare și ușor de utilizat. Datorită compatibilității crescute cu orice tip de material, precum și a inhibitorilor de coroziune din compoziție, este recomandat inclusiv pentru materialele cele mai sensibile.

Domeniu de utilizare

Ideal pentru dezinfecția manuală, prin imersie, a dispozitivelor medicale.

Utilizare

Dezinfecție prin imersie

După curățare, imersați instrumentele într-o vană de dezinfecție plină cu soluția de DESCOTON 2 % GDA*.

Toate suprafețele și cavitățile trebuie imersate complet în soluția de lucru. Clățiți insistent cu apă sterilă, după expirarea timpului de contact recomandat și uscați. După aceea, sterilizați instrumentele critice utilizând o procedură validată.

Notă:

În cazul contaminării organice vizibile, soluția de lucru DESCOTON 2 % GDA trebuie schimbată imediat; în caz contrar, este recomandată schimbarea zilnică a acesteia.

Eficacitate și metodă de testare			30 s	1 min	5 min	45 min
Bacterii și levuri						
bactericid	EN 13727	condiții de murdărie		•		
levurocid (Candida albicans)	EN 13624	condiții de murdărie		•		
tuberculocid (M. terrae)	EN 14348	condiții de curățenie			•	
sporicid (Clostridium difficile)	AFNOR NF T 72-231					•
Viruri						
activ împotriva virurilor încapsulate	RKI/DVV	incl. HBV/HIV/HCV	•			

*Pentru dezinfecția finală a dispozitivelor medicale semi-critice, cu clasă de risc A sau mai înaltă, utilizați un dezinfectant virucid precum PERFECTAN active sau DESCOTON extra.

Observații utilizare

Utilizați echipament de protecție personală corespunzător atunci când folosiți DESCOTON 2% GDA. Înainte de utilizarea DESCOTON 2% GDA, curățați insistent toate instrumentele și vanele pentru a înlătura reziduurile chimice. Vanele trebuie curățate și dezinfectate periodic, de preferință cu șervețele dezinfectante de unică folosință, impregnate cu alcool, precum DESCOSEPT AF WIPES.

Compoziție

100 g soluție conține:
2.15 g Glutaraldehydă





DESCOTON 2 % GDA

Dezinfectan pentru instrumentar

Rapoarte de expertiză

Deținem rapoarte de expertiză extinse pentru toate produsele noastre. La cerere, va putem pune la dispoziție un portofoliu al acestora.

Informații speciale

Nociv în caz de înghițire. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Provoacă leziuni oculare grave. Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se evita să se inspire vaporii. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic, dacă nu vă simțiți bine. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic, dacă nu vă simțiți bine. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.

Doar pentru uz profesional.

Produs	Ambalaj	Volum	Cantitate	REF
DESCOTON 2% GDA	canister	5 L	3	00-135-050
Accesorii dozaj	pompă dozatoare	2L/5 L/10 L	1	00-906-000-01
	robinet	2L/5 L/10 L	1	00-907-000
Accesorii adiționale	cheie deschidere bidon	-	1	00-909-050

CE 0482



Dr. Schumacher este certificat conform DIN EN 13485, DIN EN ISO9001, DIN EN ISO14001, BS OHSAS 18011 și are un sistem validat de protecție a mediului conform EMAS și este membru a IHO, VCI, BAH, DGSV și DGKH. www.schumacher-online.com

