



# Perfektan® Neu

dezinfecțant pentru  
instrumentar și endoscoape

- produs fără aldehyde cu excelentă putere de curățare
- compatibilitate crescută cu materialele, recomandat pentru reprocesarea endoscoapelor
- miros plăcut

- ✓ fără aldehyde
- ✓ fără fenoli
- ✓ fără QAC

aprobat de  
Storz



CE 0482

## Descriere produs

Perfektan® Neu este un lichid concentrat fără aldehyde, destinat curățării și dezinfecției instrumentarului medical. Are ca ingrediente active alchilamine, combinând, astfel, un puternic efect de curățare cu compatibilitate crescută cu materialele și un miros plăcut, ca urmare a compoziției fără aldehyde și fenoli. Perfektan® Neu conține inhibitori de coroziune foarte eficienți. Datorită excelentei puteri de curățare, este posibilă realizarea într-un singur pas, a curățării și dezinfecției, în conformitate cu ghidul RKI (Inst. Robert Koch) de dezinfecție a instrumentarului și endoscoapelor. Fixarea proteinelor este evitată prin compoziția fără aldehyde. Din rațiuni de protecție și siguranță a personalului medical, dezinfecția poate fi efectuată imediat după utilizare, fără pre-curățare. Perfektan® Neu îndeplinește cerințele legislației germane privind securitatea muncii, cu referință la evitarea agenților sensibilizanți în unitățile medicale conform TRGS 525/540.

## Domeniu de utilizare

Curățare și dezinfecție în timp scurt, într-o singură procedură. Perfektan® Neu este ideal pentru curățarea și dezinfecția oricărui tip de instrumentar chirurgical, inclusiv, instrumente pentru chirurgie micro-invazivă (MIS), echipamente de anestezie, endoscoape flexibile și rigide. Poate fi utilizat în vane cu ultrasunete și procesare prin recirculare.

## Utilizare

Imersați instrumentele în soluția de lucru, imediat după utilizare. Fiecare suprafață și cavitate trebuie umezită în întregime cu soluție de lucru. După scurgerea timpului de expunere recomandat, clătiți insistent instrumentarul cu apă curată. Este recomandată o clătire finală, cu apă demineralizată, urmată de uscare.

Soluția de lucru trebuie înlocuită în funcție de nivelul de contaminare. Sunt disponibile rapoarte de expertiză privind stabilitatea soluției de lucru.

Recomandare: Pentru instrumentele foarte murdare, folosiți doar detergenți pe bază de tenside non-ionice precum Instru Plus. Pentru protecția articulațiilor folosiți Spezial Ölspray.

## Spectru de acțiune

Perfektan® Neu este:

- bactericid incl. MRSA
- tuberculocid
- levurocid (C. albicans)
- eficient împotriva tuturor virusurilor încapsulate, inclusiv Vaccinia virus, BVDV și, conform echivalenței recomandărilor RKI (Institutul Robert Koch), împotriva HBV, HIV și HCV.

## Concentrații & Timp de expunere

bactericid incl. MRSA, levurocid (C. albicans)		
conf. EN 13727, EN 14561	1 %	30 min.
EN 13624, EN 14562	2 %	15 min.
micobactericid		
conf. EN 14348, EN 14563	2 %	60 min.
dezinfecție în vane cu ultrasunete	1 %	5 min.
eficient împotriva tuturor virusurilor încapsulate, conform recomandărilor RKI incl. HBV / HIV / HCV / Vaccinia / BVDV		
conf. EN 14476	1 %	60 min.
	2 %	30 min.
	3 %	5 min.



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444

Dr. Schumacher info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com



# Perfektan® NEU

dezinfecțan pentru instrumentar și endoscoape

## Compoziție

Ingrediente active în 100 g:

3.6 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1.3-diamină

Toate tensidele conținute sunt biodegradabile în conformitate cu directiva UE privind detergenții.

## Proprietăți chimice și fizice

Aspect: lichid limpede, verde  
valoare pH a concentratului: aprox. 9.4

## Mod ambalare

ambalaj individual	ambalaj comun	PZN	Nr. REF
flacon 1 L cu dozator	10 x 1 L	1833848	00-136-010
flacon 2 L	6 x 2 L	1833854	00-136-020
bidon 5 L	3 x 5 L	1833860	00-136-050

## Accesorii utilizare

Flacon cu dozator, pompă dozatoare pentru flacoane 2L și bidoane 5L, robinet pt bidon, cheie deschidere bidon, echipamente automate pt dozare.

## Informații speciale

Înainte de utilizarea Perfektan® Neu, toate instrumentele și vanele de imersie ar trebui curățate intensiv cu apă curată și Instru Plus, pentru îndepărtarea completă a reziduurilor chimice (aldehide). Pentru curățarea instrumentelor cu lumen îngust, precum endoscoapele, este recomandată utilizarea Instru Plus. Perfektan® Neu nu poate fi utilizat pentru dezinfectia măștilor laringiene.

Nociv în caz de înghițire. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Evitați dispersarea în mediu. Aruncați conținutul/recipientul la o stație autorizată pentru colectarea deșeurilor.

## Rapoarte de expertiză

Prof. Dr. Schubert, Igienist, Frankfurt/M.:

Raport de expertiză privind dezinfectia instrumentarului conform normelor DGHM/VAH, 2006-01-31.

Raport de expertiză privind dezinfectia instrumentarului conform normelor DGHM/VAH (Mycobacterium tuberculosis), 2006-02-01.

Prof. Dr. Werner, Igienist, Schwerin:

Raport de expertiză privind dezinfectia instrumentarului conform normelor DGHM/VAH, 2005-12-16.

Dr. Steinmann, Virusolog, Bremen:

Raport de expertiză privind eficacitatea virucidă împotriva Vaccinia, 2006-08-08.

Raport de expertiză privind eficacitatea virucidă împotriva HCV (BVDV), 2006-08-14.

Dr. Brill, Virusolog, Bremen:

Raport de expertiză privind dezinfectia instrumentelor în vane cu ultrasunete, 2007-10-10.

Karl Storz GmbH, Tuttlingen:

Aprobare privind utilizarea Perfektan® Neu pe endoscoape, 2007-09-10.

## Înregistrări și Certificări

Înregistrat în lista curentă a dezinfectanților VAH/DGHM.

Conform cu Directiva UE 93/42 EEC privind dispozitivele medicale.



Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Germany

T +49 5664 9496-0 · F +49 5664 8444

info@schumacher-online.com · www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher